

Användarinstruktion

MiniCollect® Kapillär blodprovtagningssystem




1 Värm gärna upp fingret där provtagningen ska utföras. Desinficera därefter huden noggrant.



2 Ta bort locket genom att trycka det lätt uppåt.



3 Utför provtagningen

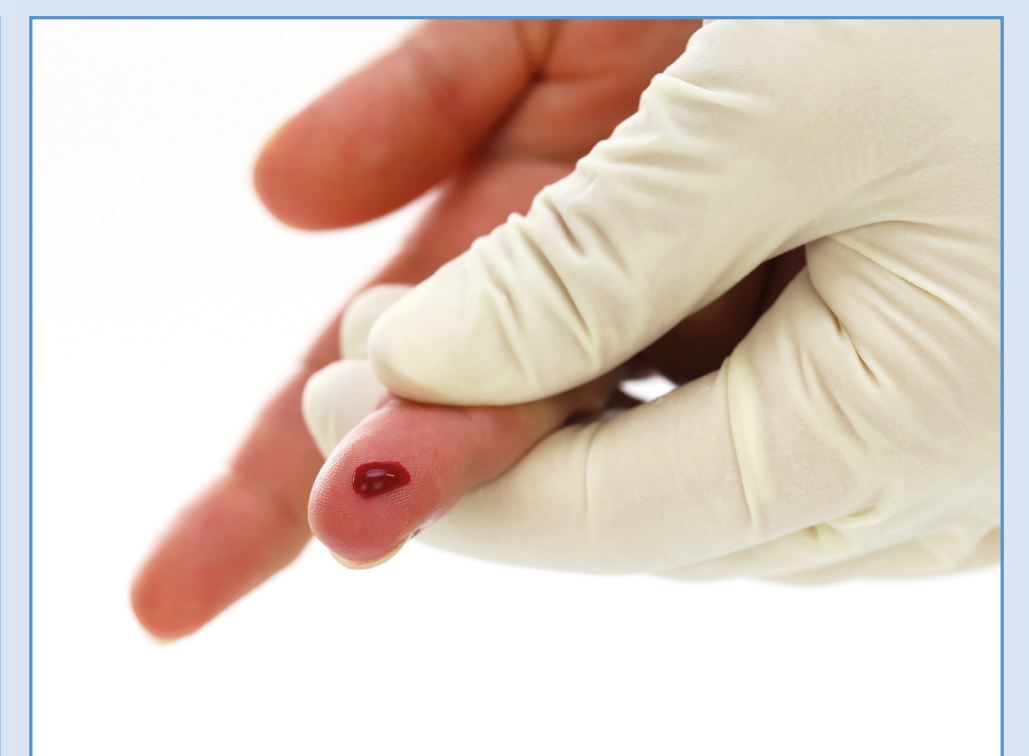

4 Tryck försiktigt på huden runt om provtagningsområdet. Använd inte den första bloddroppen.




5 Vinkla fingertoppen neråt, låt bloddroppen falla ner i provröret.



6 Återförslut provröret med originallocket. När ett klickljud hörs, har röret stängts ordentligt.



7 Vänd röret försiktigt ett flertal gånger, omedelbart efter återförslutningen.

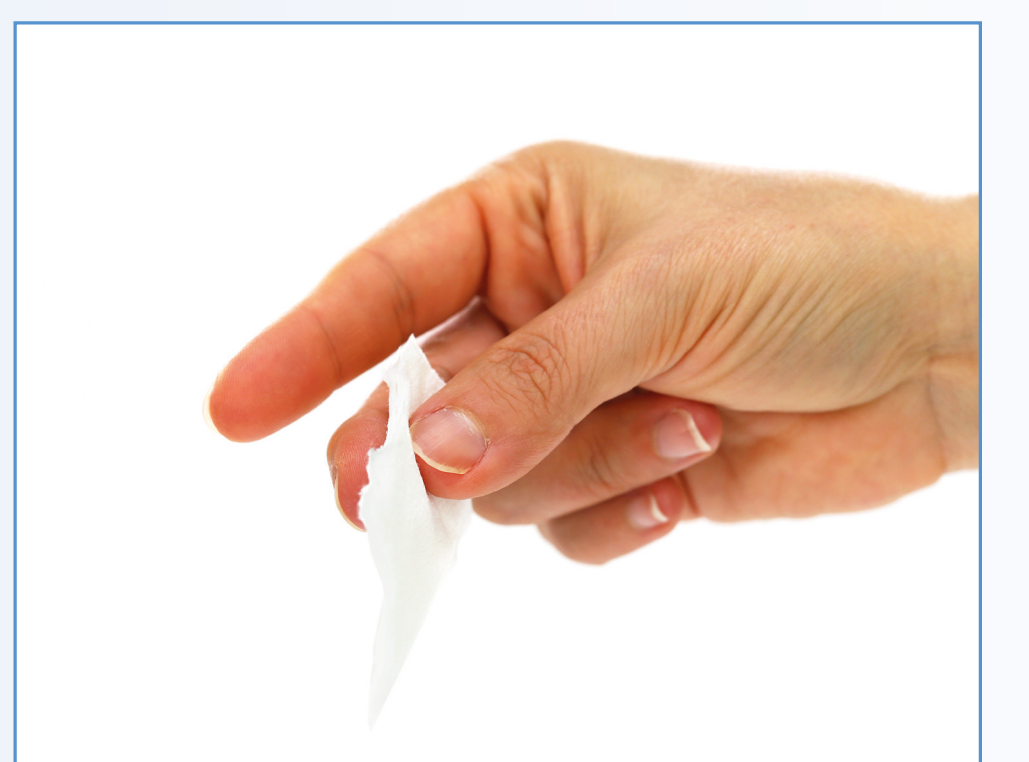

8 Lägg tryck på fingret för att stoppa blödningen.